

【お手入れ方法】

- △注意**
- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
 - 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、ほつれや伝線を避けるため、洗濯ネットを使用してください。

- 本製品は洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干ししてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。


【サイズ表】

上パート

	S	M	L
身長	155cm~165cm	165cm~175cm	175cm~185cm

下パート

	S	M	L
ウエスト	65cm~75cm	75cm~85cm	85cm~95cm

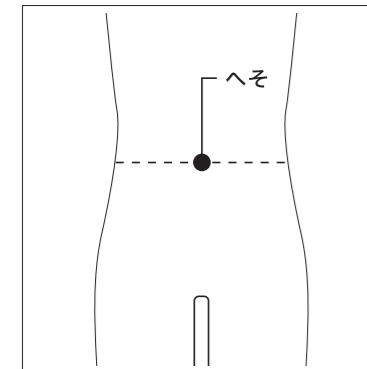

- サイズの選び方
上パートは、身長に合わせて選んでください。
下パートは、ウエストサイズに合わせて選んでください。
ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、
大きい方のサイズを選んでください。

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

 **SIGMAX** 日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-111-3410 (通話料無料) FAX.0800-222-3410 (通信料無料)
受付時間：10時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く

MEDIAID

**メディエイド
アシストギア**

**メディエイド アシストギア
腰ユニット**

—— 使用説明書 ——

安全にご使用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
またいつでもお読みになれるよう保管してください。

【はじめにお読みください】

- 本製品は使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は治療用の製品ではありません。
- 本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。
- 上パートと下パートと一緒にご使用ください。単体でのご使用では機能が発揮されません。

【ご使用にあたって】

- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、製品を強く押しつぶさないようにしてください。
面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】

本使用説明書では、安全に関する注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容


△警告	<ul style="list-style-type: none"> ●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。 ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合。 ●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・作業アシスト以外の用途で使用しないでください。 ・サイズの合った製品を使用してください。 ・妊娠中または妊娠していると思われる場合は、医師に相談してください。 ・装着手順に従って正しく使用してください。 ・ベルトやストラップをきつく締めすぎないでください。 ・使用中にゆるんだり直したりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。 ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。 ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。 ・面ファスナーやバックルを外したまま、作業しないでください。事故の原因になるおそれがあります。 ●本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●バックル着脱時は、上下のバックルを持ち、指を挟まないよう注意してください。 ●面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。 ●本製品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当たらないでください。 ●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。 ●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【各部の名称】


<上パート・前側>




<下パート・前側>

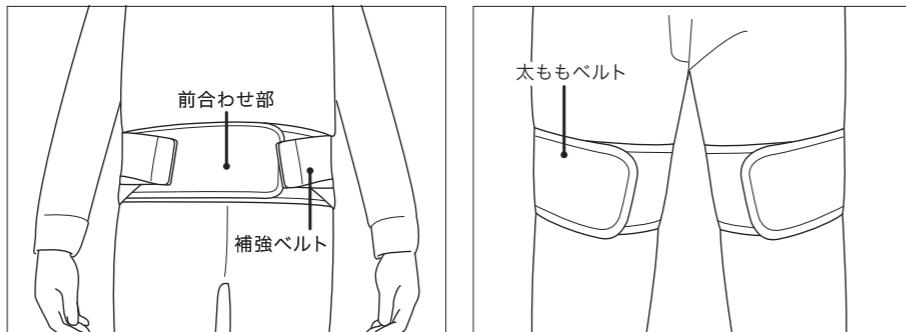

<上パート・後ろ側>

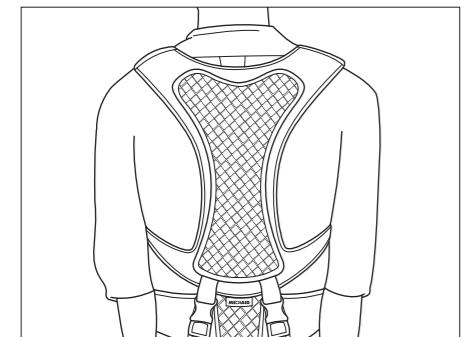


<下パート・後側>

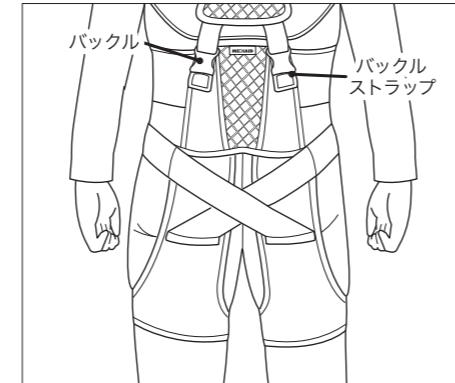


【装着手順】

- 装着前に本使用説明書【使用上の注意ー必ずお読みくださいー】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確かめてください。

①上パートと下パートのバックルを連結します。


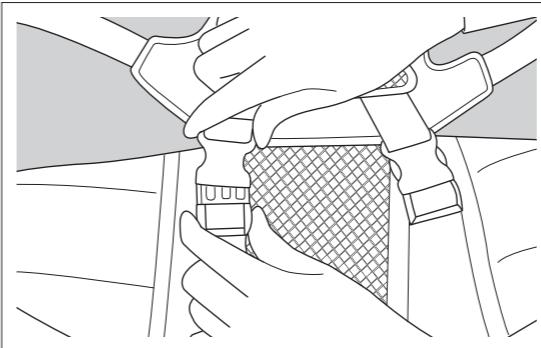


②バックルストラップを調節します。

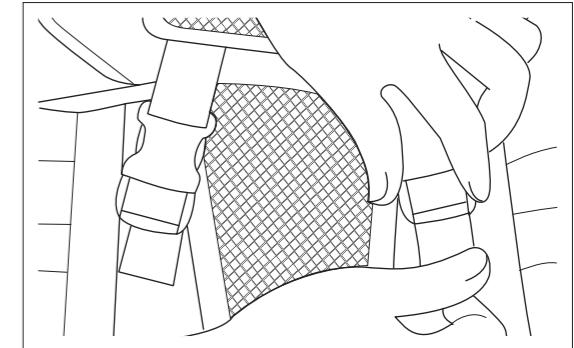


※サイズ下限の方は引っ張って締め、サイズ上限の方は緩めに調節してください。

③上パートの肩ベルトに腕を通します。

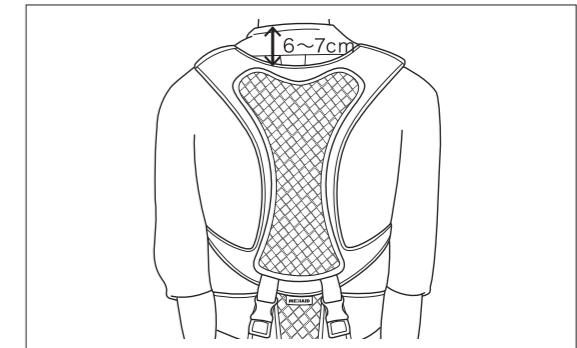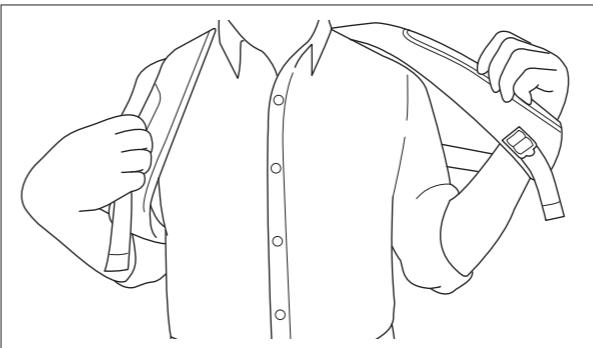


※襟のつけ根から6~7cm下に上パートの上端がくる位置を目安として下さい。

④前合わせ部を引っ張り、とめます。

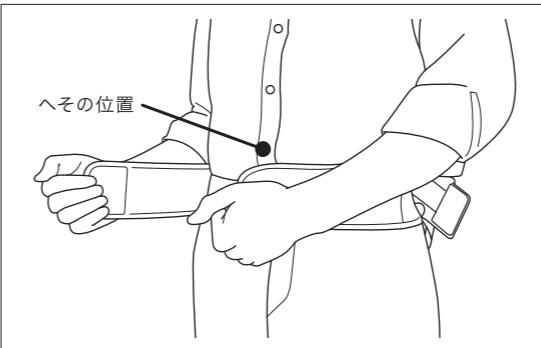


※前合わせ部上端がへその位置にくるように装着してください。

⑤太ももベルトを調節します。

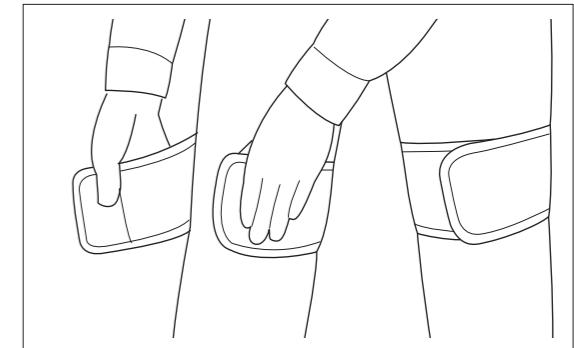


下方向へ引っ張りながら、太ももベルトをとめます。

⑥補強ベルトを引っ張り、とめます。

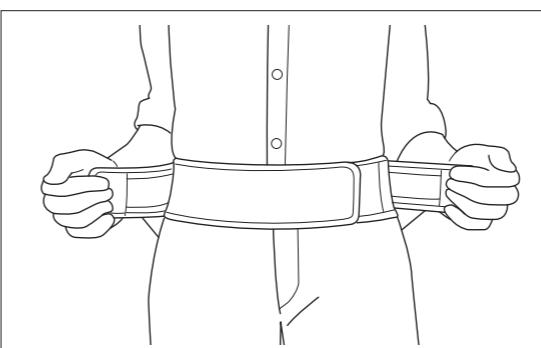

⑦調節ストラップを引っ張り、フィットさせます。

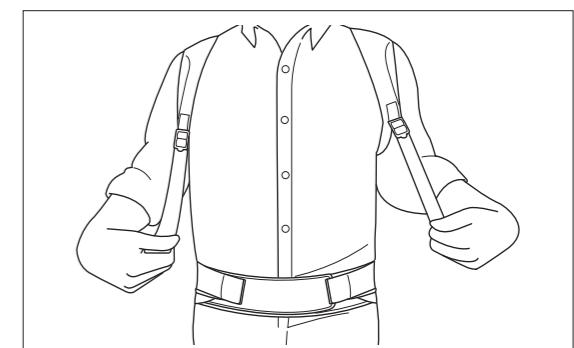

⑧製品のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。