



## — 使用説明書 —

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
安全にご利用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。  
また、本使用説明書はいつでもお読みになれるよう大切に保管してください。

### 【用途】

- ヒザの保護

### 【特長】

- ホールド力のある伸縮素材とアクティブ樹脂ステー※(支柱)がグラつきを抑え、ヒザをしっかりとサポート。※特許取得済
- 人体の三次元計測データをソーターの設計に活かし、ヒザにしっかりとフィット。
- 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭機能※付き。
- ※消臭機能のある弹性糸(ロイカ®CF)を使用。ロイカ®は旭化成(株)の登録商標です。
- ヒザ裏に薄い素材を採用。服の下でもかさばりにくく、サポート力を発揮します。

### 【はじめにお読みください】

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品はヒザの保護を目的としていますが、必ずしも完全に保護できるものではありません。
- 本製品はヒザの疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.6にあります。

### 【ご使用にあたって】

- ヒザ裏の薄い生地に面ファスナーをつけないでください。生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 肌あれした手や爪など、鋭利なもので引っかけないでください。ほつれや伝線の原因となります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

## 【使用上の注意－必ずお読みください－】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

### △警告

- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
  - ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
  - ・装着部に骨折、傷、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
  - ・ヒザ以外の部位に使用しないでください。
  - ・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.6にあります)。
  - ・就寝時は使用しないでください。
  - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
  - ・上下、表裏を正しく使用してください。
  - ・装着手順に従って正しく使用してください。
  - ・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
  - ・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
  - ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
  - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品のアクティブ樹脂ステーはプラスチック製です。負傷事故を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
  - ・本製品との接触により、他人を傷つけることが予想される場合。
- 本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
  - ・つけごちが悪いなど違和感がある場合。
  - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

### △注意

- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。


## 【お手入れ方法】

### △注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯しないでください。面ファスナーがつくと、ほつれや伝線の原因となります。


- 洗濯の際は、水と洗濯用合成洗剤などでていねいに押し洗いし、日陰で吊り干しにしてください。洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れ、弱水流で洗濯してください。
- 洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- 乾燥機の使用、ドライクリーニングは避けてください。また、アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

## 【各部の名称】

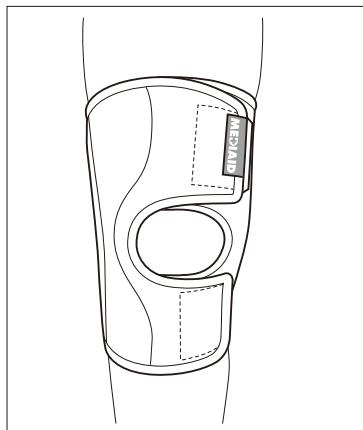


※本製品は左右兼用です。図は右脚に装着しています。

### ＜製品の表側＞

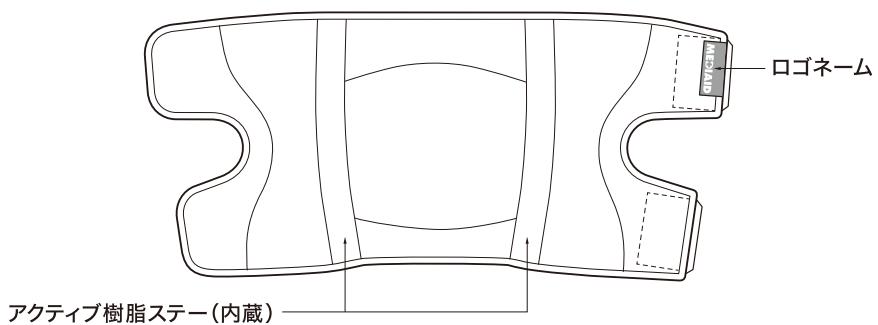


### ＜製品の裏側＞

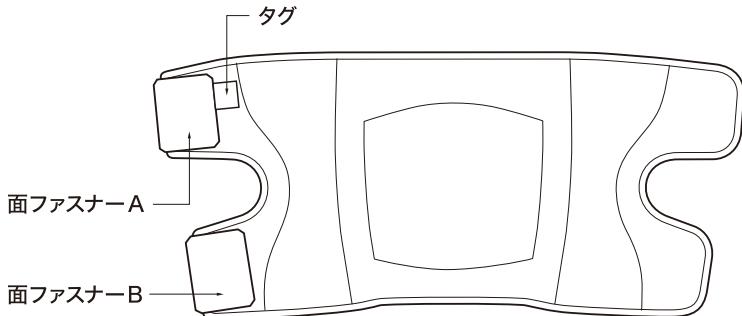

## 【装着手順】


- 装着前に本使用説明書P.2の【**使用上の注意－必ずお読みください－**】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。

- ① サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下・表裏を確かめてください。**

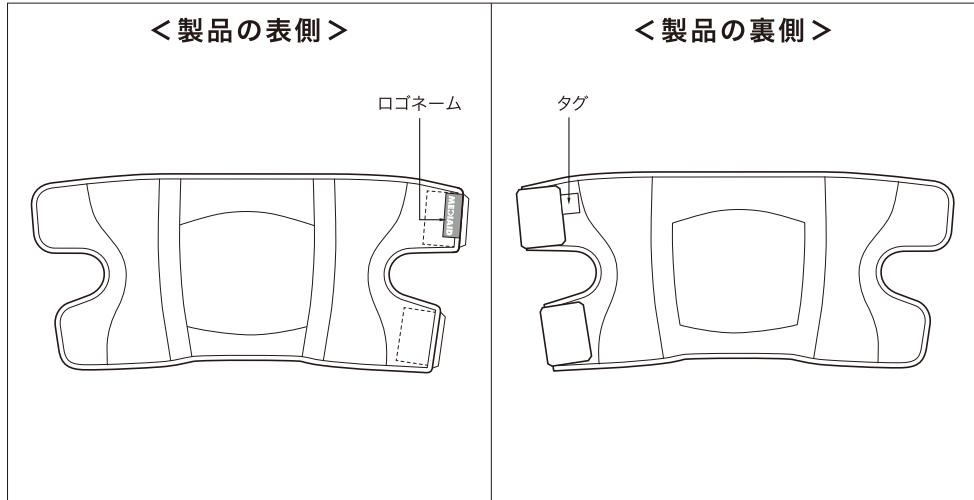


サポーター本体裏側のサイズ表示のタグがついている方が上で、体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

- ② ロゴネームを前面上にしてサポーターをヒザ裏に当てます。**

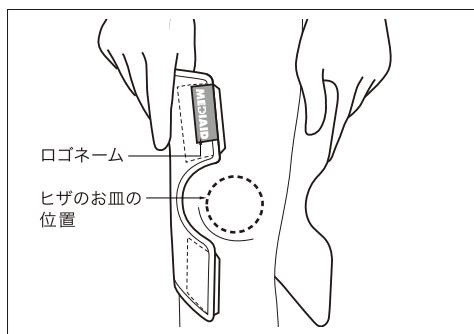


ヒザをまっすぐに伸ばして、ヒザ穴の位置とヒザのお皿が合うように、ヒザ裏にサポーターを当てます。

**③面ファスナーAをとめます。**

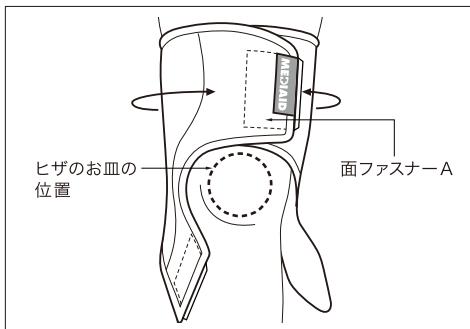


ヒザ穴の上縁がヒザのお皿の上端にくるように面ファスナーAを斜め上に引っ張りながらとめます。

**④面ファスナーBをとめます。**

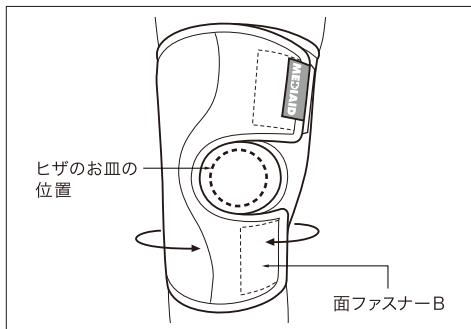


ヒザ穴の下縁がヒザのお皿の下端にくるように面ファスナーBを斜め下に引っ張りながらとめます。

**⑤適度な圧迫になるようにそれぞれの面ファスナーの位置を調整します。**

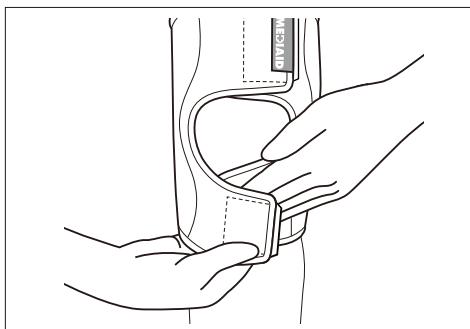

適度な圧迫になるまで、それぞれの面ファスナーをとめ直します。


**⑥ヒザをまっすぐに伸ばして、ソーターを上下に引っ張り、たるみを直します。**

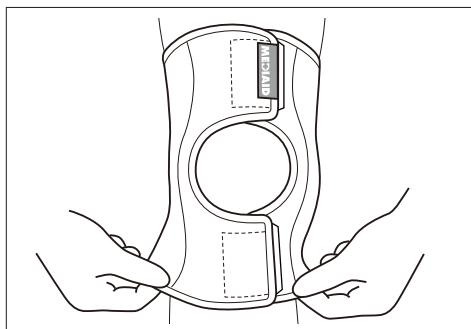


ヒザの前だけでなく、後ろのたるみもしっかり伸ばしてください。

**⑦ サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。**


**装着完了時（右脚の場合）**

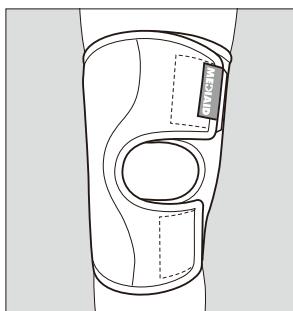

<前から見た図>

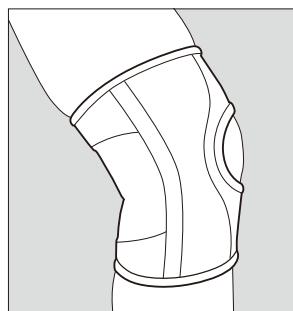

<横から見た図>

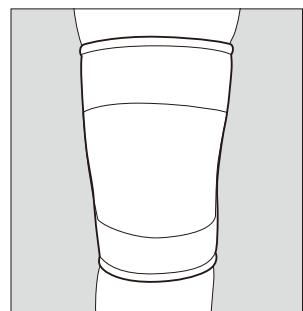

<後ろから見た図>


## 【素材】

素材	
繊維	ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
繊維以外	クロロプロレン、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

## 【サイズ表】

サイズ	適用範囲(太ももの太さ)	1箱入数
S	36~40cm	1コ
M	40~44cm	
L	44~48cm	
LL	48~52cm	

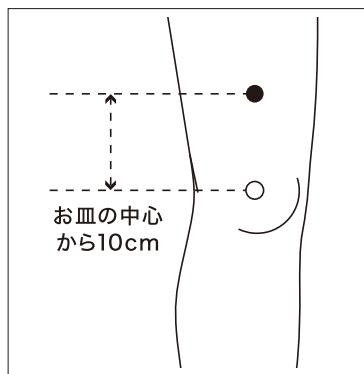

### ● サイズの選び方

太ももの太さに合わせて選んでください。太ももの太さは、普通に立った状態で、ヒザのお皿の中心から10cm上の太さを計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。両脚に装着する場合は、左右の太さをそれぞれ測って、正しいサイズを選んでください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

 SIGMAX 日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

お客様窓口：TEL.0800-111-3410（通話料無料）

受付時間 10時～17時（平日） ※土日、祝祭日、年末年始を除く

パッケージ本体：紙