



# 装着手順

●面ファスナーをすべて取り外し、製品の向きを確かめてください。


## ① 上パーツと下パーツのバックルを連結します。

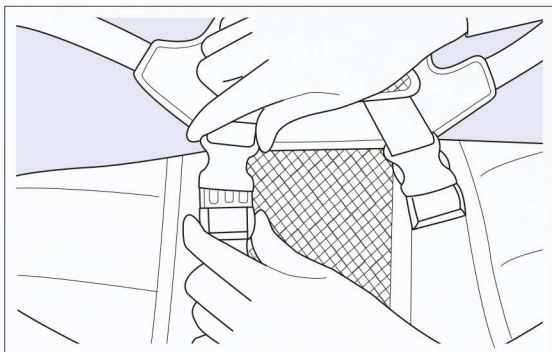


## ② バックルストラップを調節します。

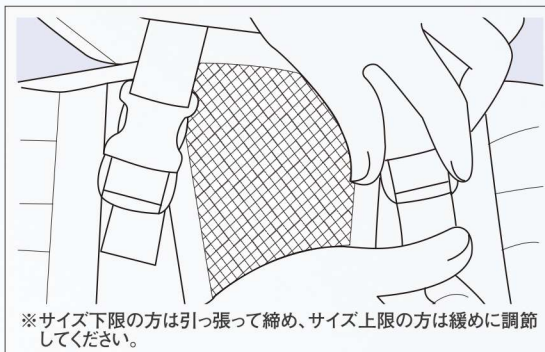

## ③ 上パーツの肩ベルトに腕を通します。

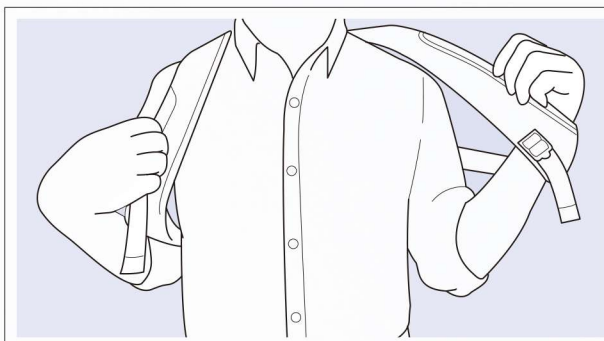


## ④ 前合わせ部を引っ張り、とめます。

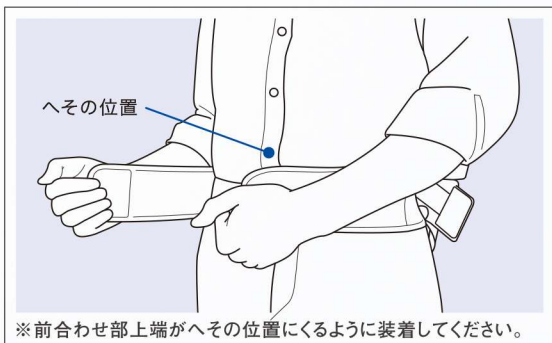


## ⑤ 太ももベルトを調節します。



## ⑥ 補強ベルトを引っ張り、とめます。

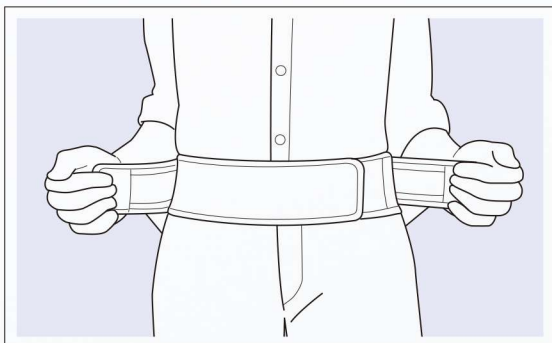

## ⑦ 調節ストラップを引っ張り、フィットさせます。

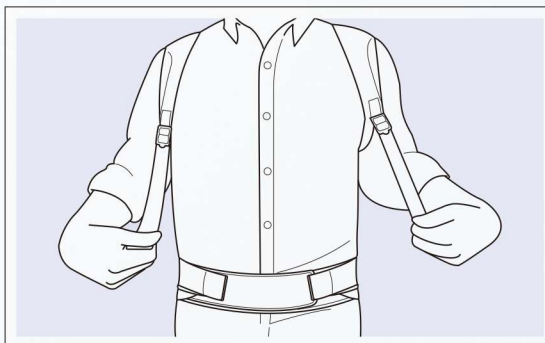

⑧ 製品のゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。