

首元を冷やして暑さ対策

22℃以下の環境で

水や
カーエアコンでも
固まる!

冷却固体化

適度な冷たさで

長時間快適



メディエイド
アイシングギア

首用

MEDIAID

メディエイド アイシングギア 首用

【はじめにお読みください】

本製品は使用状況によって、冷却できない場合があります。

【ご使用にあたって】

- ・素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- ・結露により、衣類や冷却部分が濡れることがあります。
- ・冷却固体時の膨張による破裂防止のため、中に気泡が入っています。

【使用上の注意-必ずお読みください-】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△ 警告：誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△ 注意：誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

△ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。 ・装着部に傷、しびれ、湿疹などの異常がある場合。 ・レイノー病（症候群）、その他の血液痙攣性疾患、冷えに対する過敏症、局所の血液循環不良、神経障害のある方。 ● 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・本製品は食べられません。 ・冷却以外の用途で使用しないでください。 ・就寝時は使用しないでください。 ・使用方法に従って正しく使用してください。 ・長時間冷却する場合は、血行障害や凍傷のおそれがありますので、注意してください。 ・本製品に摩擦、損傷、液漏れがある場合は使用しないでください。 ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。 ● 本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。 ● 中身が皮膚に付着した場合や目に入った場合は水でよく洗ってください。異常がある場合は医師に相談してください。
△ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品を落としたり、硬いもの、とがったものにぶつけたりすると、破れるおそれがありますので注意してください。 ● 製品の中身が漏れて衣類などに付着した場合は、まず布などで拭き取り、その後よく水洗いしてください。 ● お子様の手の届く所を避けて保存してください。 ● 高温になる場所に置かないでください。変形、劣化を引き起こすことがあります。

【使用方法】

- ① 本製品を22℃以下の環境で中身が固体化するまで冷やします。
- ② 固体化が確認できたら、首に装着してください。
- ③ ご使用前に締め付け感がある場合は、中身を指で軽く押し崩さか、本体を左右に広げるようにしてください。

【お手入れ方法と廃棄方法】

- ・製品が汚れた時は、軽く水洗いしてください。
- ・製品を処分する際は、内容物を水道に流さないでください。製品の特性上、温度によって水道が詰まる恐れがあります。また、内容物は生ゴミとして、外装は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
 ※製品には万全を期しておりますが、万一不良なおお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

【販売元】日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
 お客様窓口：TEL:0800-111-3410（通話料無料）
 受付時間：10時～17時（平日） ※土日、祝日、年末年始を除く



外装



台紙

WEBアンケートご協力をお願い

ご回答者様の中から抽選で
毎月10名様に
1,000円分をプレゼント!

▼ ▼ ▼ 詳しくは下記をCheck! ▼ ▼ ▼

ご回答方法

QRコードの読み取り、またはアドレスの
 直接入力でごアクセスし、ご回答ください。



https://mediaid.sigmax.co.jp/special/enq_customervice/

- ※上記URLにアクセスすると、アンケートフォームページに自動的に移動します。
- ※回答は1商品につき、1回のみとなります。重複して回答された場合、プレゼント応募は無効となります。
- ※パッケージのバーコードに記載した番号が必要になります。